





ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI ELETTRODI DELLA CONDUETTANZA CUTANEA

Informazioni generali sulla preparazione della pelle (indipendentemente dal tipo di elettrodo): Una preparazione della pelle, la pulizia della pelle non è necessaria e non è raccomandata. È sufficiente lavare semplicemente le mani, con il sapone non sgrassante. Lo stesso vale per la pulizia della pelle con l'alcool. Solo in caso di pelle particolarmente grassa o quando è stata usata una crema idratante, la pelle deve essere lavata con acqua tiepida e, se necessario, liberata da residui oleosi con alcool (70%).

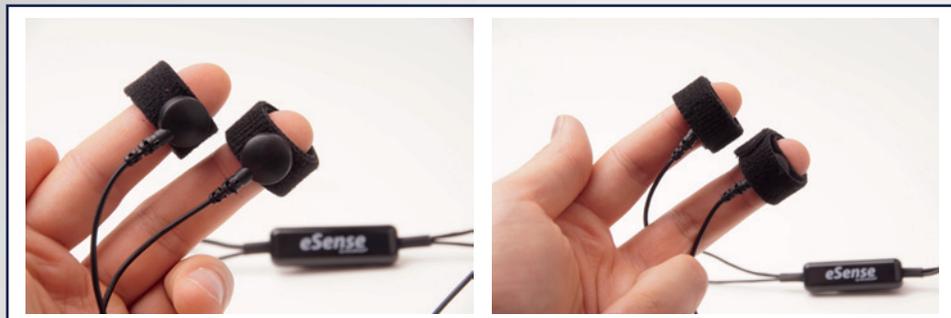

Elettrodi di velcro

Gli elettrodi a bolle vengono avvolti attorno all'indice o al dito medio e l'elettrodo deve essere a contatto diretto con la pelle. Quindi collegare i cavi dei pulsanti agli elettrodi. È possibile avvolgere il velcro attorno ai pulsanti per migliorare la stabilità dei cavi, come mostrato a destra.

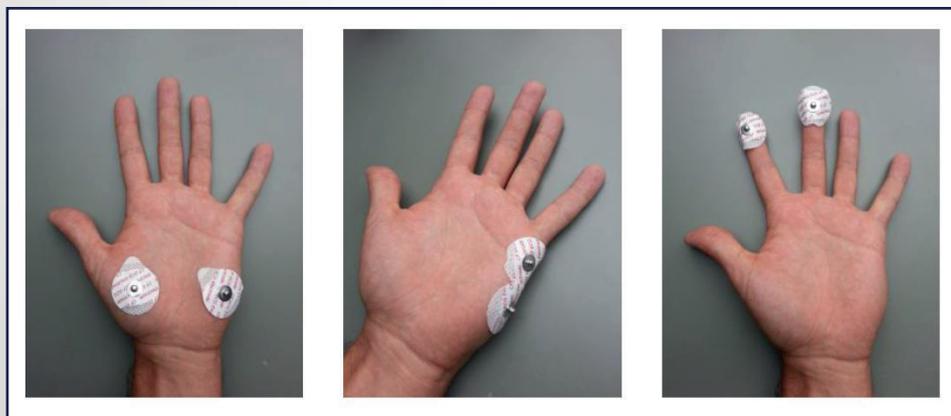


Elettrodi a gel

Si raccomanda usare gli elettrodi usa e getta. Sono possibili tre diverse posizioni di scarico, come mostrato nelle immagini. Le posizioni sono considerate equivalenti. Quindi, collegare i cavi degli elettrodi agli elettrodi, utilizzando i connettori del pulsante.



Clip delle dita

Questi clip per dita EDA vengono semplicemente collocati sull'indice e sul dito medio. Quindi, collegare i cavi del pulsante push eSense agli elettrodi (il cavo deve essere nella direzione della tacca nelle clip).

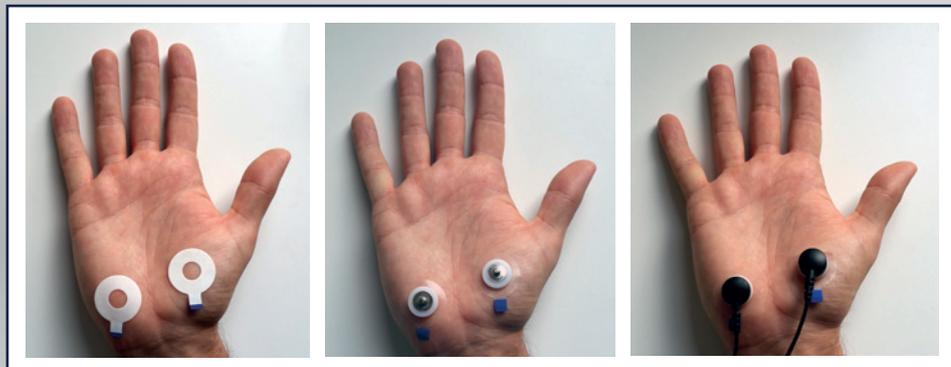

Elettrodi ad adesivo EDA con gel per elettrodi

In questo caso, è consigliabile scegliere le posizioni degli elettrodi sui muscoli thenari e ipotenari sul palmo della mano. Fissare prima gli agnelli adesivi. Gli elettrodi vengono quindi riempiti con il gel. Per fare ciò bisogna prima togliere la pellicola protettiva. Infine vengono collegati i cavetti ai bottoni.