


MÖGLICHE BEFESTIGUNGEN

für den eSense Temperature Sensor



Sie können den Sensor einfach festhalten, ihn mit dem Klettband fixieren (inkludiert), ein Rollenheftpflaster (optional) nutzen oder unseren Fingerclip (optional) verwenden. Rollenheftpflaster sind in jeder Apotheke und der Fingerclip in unserem Online Shop erhältlich unter: www.mindfield-shop.com

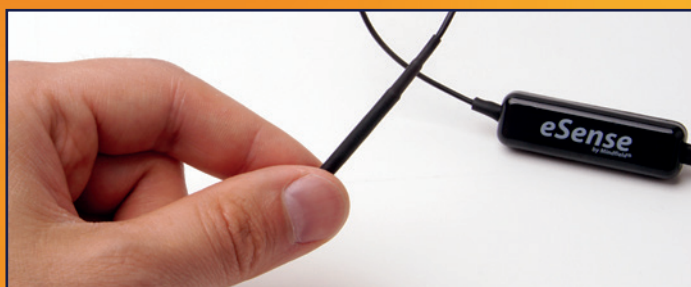

Festhalten

Kein zusätzliches Equipment notwendig, halten Sie den Sensor einfach zwischen dem Zeigefinger und Daumen.



Klettband

(inklusive)

Mit dem eSense Temperature ist ein Klettband inklusive. Sie können mit dem Klettband den Sensor an Ihrem Finger befestigen.




Rollenheftpflaster

(medizinisches Pflaster, optional)

Befestigen Sie den Sensor einfach mit Rollenheftpflaster an Ihrem Finger oder Ihrer Handfläche. Sie bekommen Rollenheftpflaster in jeder Apotheke.

UNSERE VORRANGIGE EMPFEHLUNG!

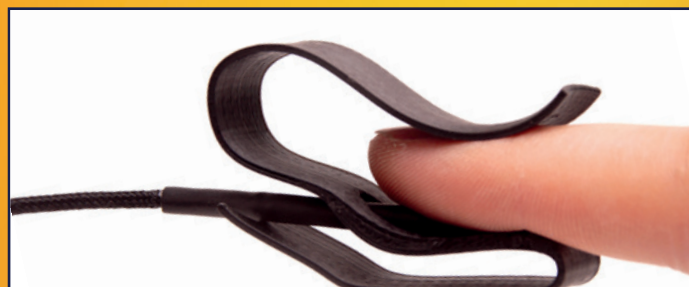

Fingerclip

(optional)

Dies ist unsere empfohlene Methode zur Befestigung. Der Fingerclip verklebt nicht, da kein Kleber verwendet wird. Das offene Design sorgt dafür, dass kein Wärmestau entsteht. Sie können den Fingerclip in unserem Online Shop bestellen.



[JETZT BESTELLEN >>](#)